

GEBRAUCHSANWEISUNG

1.

Verteilen Sie einmal im Monat nach dem Befüllen der Katzentoilette, den gesamten Inhalt dieser Packung HEALTH INDICATOR® gleichmäßig über die neue Katzenstreu.

2.

Einen kurzen Moment nachdem Ihre Katze die Katzentoilette benutzt hat, vergleichen Sie die Farbe des Urins mit der untenstehenden Farbkarte. Die normale Farbe ist hell bis dunkelgelb. Wenn eine andere Farbe sichtbar wird, wenden Sie sich an Ihren Tierarzt (abnormal gefärbte Füllung entfernen).

3.

Nach Abschluss des Tests können Sie das HEALTH INDICATOR®-Streu mit dem anderen Katzenstreu vermengen, dort hilft es unangenehme Gerüche zu entfernen.



In Haushalten mit mehreren Katzen müssen die Katzen so getrennt werden, dass jede Katze eine eigene Katzentoilette mit HEALTH INDICATOR® hat. Wenn Ihre Katze normalerweise gräbt vor dem Urinieren, leeren Sie die Katzentoilette und streuen Sie den Inhalt gleichmäßig in die Katzentoilette. Nach dem Test können Sie die Katzentoilette mit normalem Katzenstreu befüllen.

NORMALE FARBEN



TIERARZT AUFSUCHEN

