

GEBRUIKSAANWIJZING

1.

Strooi eens per maand, na het verschonen van de kattenbak, de gehele inhoud van dit zakje HEALTH INDICATOR® gelijkmatig uit over de nieuwe kattenbakvulling.

2.

Vlak nadat uw kat de kattenbak gebruikt heeft, de kleuren van de urine op de plasplek vergelijken met de kleuren in de bijgaande tabel. De normale kleur is licht- tot donkergeel. Indien een andere kleur zichtbaar wordt, neem dan contact op met uw dierenarts (abnormaal gekleurde vulling verwijderen).

3.

Na het testen kan de HEALTH INDICATOR® door de normale vulling worden geroerd waar het helpt om geurtjes te verwijderen.



In huishoudens met meerdere katten zou iedere kat een eigen kattenbak moeten hebben met HEALTH INDICATOR®. Als uw kat normaal gesproken eerst graaft voor het urineren; maak de kattenbak leeg en strooi de inhoud van de HEALTH INDICATOR® gelijkmatig uit over de kattenbak. Na het testen, de kattenbak met normale kattenbakvulling vullen.

NORMALE KLEUREN



NAAR DIERENARTS

